

テストクレジットの追加方法

A. ソフトウェアダウンロード

TC LOADER のダウンロードを行うため、インターネットにアクセスできる Windows PC もしくは、Android 端末をご用意してください。

Windows 用 <https://www.testcreditcode.com/>

Android 用



- 上記より、ダウンロードを実行してください。
- PC では、デバイス変更許可の画面が表示されたらそのまま“はい”をクリックしてください。

B. TCコードローダーキットの確認



RS232 Splitter



RS232-USB Converter



Android Phone Adapters



Micro USB

USB Type C

- RS232-USB Converter を使って機械本体と PC 又は Android とつないでください。
- SQA クイックチェックのプリンターをつなぐ場合、RS232 Splitter をお使いください。
- Android をつなぐ場合は Android Phone Adapters をお使い下さい。RS232 Splitter をつないで PC と Android の両方をつなぐこともできます。

C. 本体機械の設定方法について


- 検査の時同様、本体の電源を入れてください。
機械が立ちあがったら MAIN MENU の一番下の項目【SERVICE】を選択します。
- SERVICE MENU が立ちあがるので、一番上の【SERVICE DATA】を選択します。
数値が羅列された画面にできたら機械本体の設定は完了です。

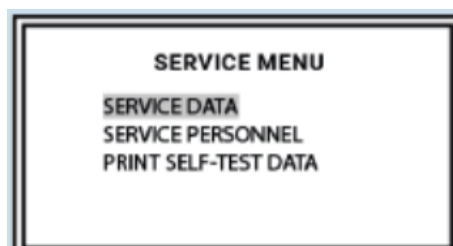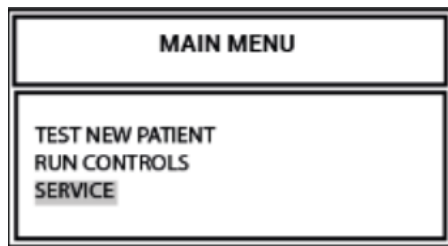

SERVICE DATA		
1. 21	8. 100	15. 1700
2. 5	9. 10	16. 100
3. 150	10. 6	17. 2
4. 28	11. 138	18. 1000
5. 69.81	12. 31	19. 100
6. 512	13. 100.0	20. 100
7. 0.000	14. 100	



D. パソコンまたはスマートフォンのアプリを起動

- パソコンまたはスマートフォンのアプリを起動させます。
- Prepare Your SQA-Device の画面が表示されたら、下記 3 つの中（左画像）からお使いの機種を選択して、PC なら CONTINUE をクリック、スマートフォンなら I'M READY をタップして下さい。アクセス制限のメッセージが表示されたら許可してください。

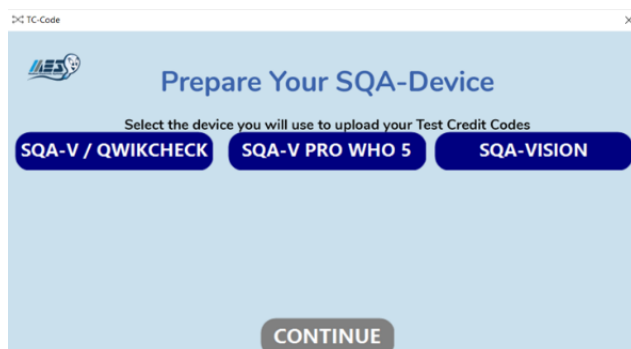


E. クレジットコードの入力方法

- コード入力画面が表示されますので、お手持ちのキャピラリーの箱のカバーを開けた裏面に記載されている9桁のコードを入力します。※バルクタイプは袋に貼られています。
- PCではSELECTION COMMUNICATION PORT下のタブから接続ポートの選択及び確認をします。入力後、SUBMITをクリックもしくはタップします。緑色でSUCCESSと表示されたら終了です。

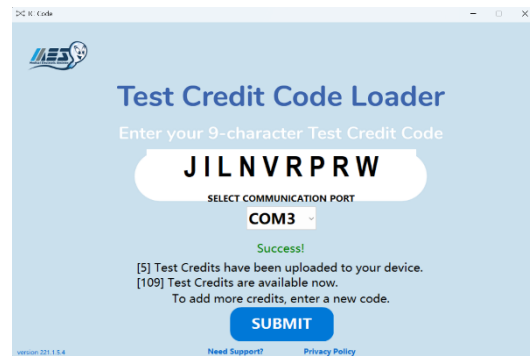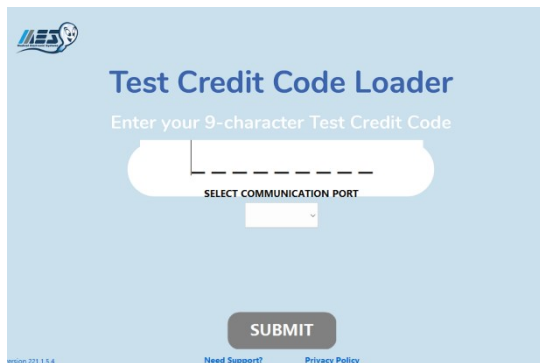

★コミュニケーションエラーが発生した場合（COMの確認）

- Windows マークのスタートボタンを右クリックするか、パソコンの設定を開き、検索欄で【デバイスマネージャー】と入力し検索します。
※バージョンによっては仕様が異なる場合がございます。
- デバイスマネージャーをクリックすると下記、画面（右画像）が表示されます【ポート（COMとLPT）】という欄があるので選択し、接続している USB Serial Port の COM の数値を確認します。

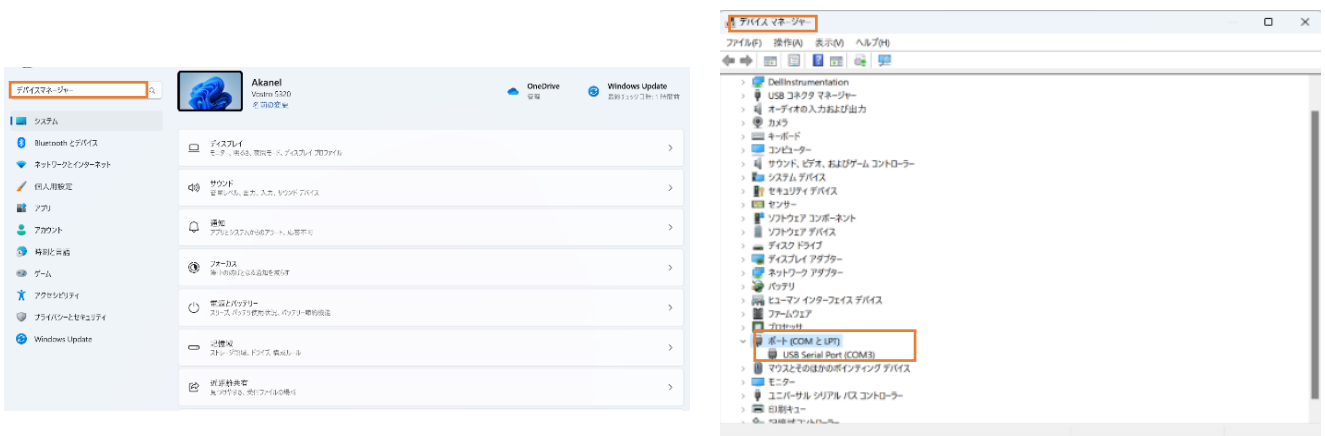

- bで確認したCOMの数値を接続ポートにて選択します。
- 入力後、SUBMITをクリックし、緑色で**SUCCESS**と表示されたら終了です。

4. 終了方法

- 機械本体電源を切り、再度立ち上げTEST REMAININGにてテスト数が追加されたことを確認します。
- パソコンで立ち上げているTC-Codeアプリも×ボタンで閉じます。
以上で操作完了です。

* 操作方法に関して、ご不明な点等ございましたら、お気軽に下記までご連絡下さい。

株式会社ジャフコ

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢 1-27-15-3F

TEL : 03-5431-3551 (担当直通) MAIL : toiawase@jaffcoltd.com